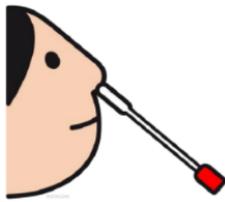
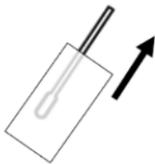
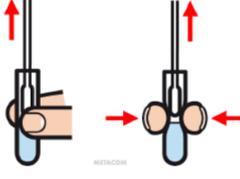


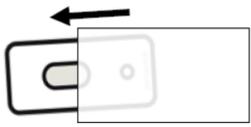
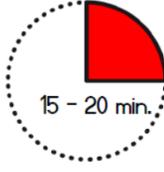
Anleitung zum Schnelltest

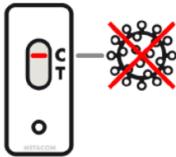
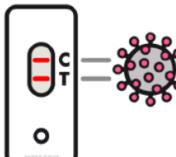
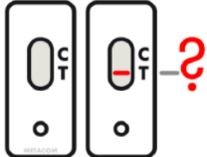
<p>So teste ich mich selbst</p> 	 <p>1. Hände waschen.</p>	 <p>2. Nase mehrmals schnäuzen.</p>
---	--	--

 <p>3. ganzen Inhalt einfüllen. Röhren in Röhrenständer stellen.</p>	 <p>4. Tupfer aus der Verpackung entnehmen.</p>	 <p>5. Nasenabstrich nehmen.</p>
---	--	---

Die Unterseite der Verpackung dient als Röhrenständer 

 <p>6. 3 - 5 Mal drehen. 1 Minute warten!</p>	 <p>7. Tupfer ausdrücken.</p>	 <p>8. Röhren fest verschließen.</p>
--	--	---

 <p>9. Testkassette aus Verpackung nehmen.</p>	 <p>10. 3 Tropfen auf Testkassette geben.</p>	 <p>11. 15 - 20 Minuten warten.</p>
---	--	--

 <p>12a. Ergebnis ablesen: Negativ = Ihr Kind darf zur Schule.</p>	 <p>12b. Ergebnis ablesen: Positiv = Ihr Kind darf NICHT zur Schule!</p>	 <p>12c. Ergebnis ablesen: ungültig = Test mit neuem Test wiederholen!</p>
---	---	---